

Inleiding

Doelgroep

Dit FFP2 gelaatsmasker is bedoeld als filter voor het gebruik tegen het inademen van deeltjes en virussen in de lucht.
Dit gelaatsmasker is ontworpen voor eenmalig gebruik, gedurende 1 shift (single shift).

Symbolen gebruikt in deze handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:



Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot fysiek letsel of schade aan het product.



Geeft nuttige informatie aan.



Identificatie van de producent.

Garantie

De garantie van dit FFP2 gelaatsmasker verloopt nadat de uiterste gebruiksdatum, zoals aangegeven op het masker (mm/yyyy), overschreden is. Na deze datum kan de werking van dit masker zijn verminderd.

Contact



AFPRO Filters B.V.
Berenkoog 67
1822 BN te Alkmaar, Nederland
www.afprofilters.com

Productbeschrijving

Bedoeld & onbedoeld gebruik

Een FFP2 gelaatsmasker is bedoeld om gebruikt te worden als filter voor de ingaande lucht tijdens het ademen. Dit masker is bedoeld als halfgelaatsmasker en is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen het inademen van deeltjes en virussen. Dit masker is niet bedoeld voor het filteren van vloeistoffen, geur, gassen en vluchtige dampen.
Dit masker is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) voor algemeen gebruik in de omstandigheden waar een adembescherming nodig is in de klasse FFP2.

Levensduur

Dit FFP2 gelaatsmasker is bedoeld om eenmalig gebruikt te worden gedurende één shift (single shift).

Materialen en allergieën

Dit FFP2 gelaatsmasker is gemaakt van polypropyleen, polypropyleen spunbond, gewikkeld, vlamvertragend polyester en bi-component nonwoven spunbond.

⚠ Voor zover bekend wekken de gebruikte materialen geen allergieën op. Wanneer het gebruik van dit gelaatsmasker desondanks gepaard gaat met irritatie, staak dan direct het gebruik.

ℹ Dit gelaatsmasker bevat geen natuurrubber.

Conformiteit

Dit gelaatsmasker is een FFP2 gelaatsmasker en valt onder categorie III persoonlijk beschermingsmiddel.
Dit gelaatsmasker voldoet aan de volgende eisen:

- Technical Specification: BSI's PPE for Healthcare Professionals 2020/403 – Respiratory Protective Equipment, according to EU_2020_403 Technical Specifications for Covid-19.
- EN 149:2001+A1:2009.
- Richtlijn PPE Regulation (EU) 2016/425. NB 2797 - BSI Group The Netherlands B.V., John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands. CE 2729.

Voor de volledige conformiteitsverklaring van dit gelaatsmasker, zie: <https://www.afprofilters.com/product/disposable-masks/TC-2-B1/DeclarationOfConformity/>

Veiligheid

Symbolen op het product en op de verpakking

Symbol	Verklaring
	Dit gelaatsmasker dient direct na gebruik weggegooid te worden in een afvalbak voor restafval of volgens de lokale voorschriften.
	CE-markering en identificatienummer van het Notified Body. Dit gelaatsmasker voldoet aan de eisen van de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EU) 2016/425.

Veiligheidsinstructies

- ⚠ **Waarschuwing!**
- 

⚠ Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit gelaatsmasker gebruikt.
- 

⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet na de uiterste gebruiksdatum zoals aangegeven op het masker (mm/yyyy). Na deze datum kan de werking van dit masker zijn verminderd.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 - ⚠ Volg bij het gebruik van dit gelaatsmasker altijd de lokale veiligheidsinstructies op.
 - ⚠ Vervang dit gelaatsmasker wanneer correct gebruik niet gegarandeerd kan worden.
 - ⚠ Draag dit gelaatsmasker voortdurend tijdens periodes van mogelijke blootstelling aan deeltjes en virussen in de lucht. Bij het niet of onvolledig dragen van dit masker tijdens mogelijke blootstelling kan ernstige schade voor de gezondheid optreden.
 - ⚠ Zorg dat dit gelaatsmasker tijdens de hele gebruikperiode goed en luchtdicht aansluit op het gezicht (zie *Gebruik*).
 - ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker altijd in zijn geheel.

Gebruiksaanwijzing

FFP2 gelaatsmasker



Zie ook de instructievideo
manual-tcb.afprofilters.com



AFPRO Filters B.V.
Berenkoog 67
1822 BN, Alkmaar
Nederland

sales@afprofilters.com
www.afprofilters.com

Nederlands (originele taal)
Revisie 3 – 06/2021



- ⚠ Loshangende elastische lussen kunnen blijven haken of gegrepen worden door draaiende machines of onderdelen. Laat de elastische lussen van dit gelaatsmasker niet loshangen tijdens gebruik.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker eenmalig, gedurende maximaal één shift. Gooi het masker na gebruik in een afvalbak voor restafval.
- ⚠ Staak het gebruik van dit gelaatsmasker wanneer de ademweerstand te hoog wordt.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet op een vochtig of nat gezicht.
- ⚠ Bij het gebruik van dit gelaatsmasker met een baard kan de optimale werking niet worden gegarandeerd.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet in een omgeving waar de verontreiniging en/of concentraties in de lucht onbekend zijn.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet wanneer het zuurstofgehalte in de lucht lager dan 19,5% is.
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet bij een relatieve luchtvochtigheid van hoger dan 80%;
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker alleen bij een temperatuur tussen -20°C en +40°C;
- ⚠ Gebruik dit gelaatsmasker niet in de buurt van open vuur of in een explosieve omgeving.
- ⚠ Dit gelaatsmasker mag niet worden veranderd, gereinigd of gerepareerd.

Gebruik


Opzetten van het masker

Het opzetten van het masker doet u zo:


1. Was en ontsmet uw handen.
2. Pak het masker op.

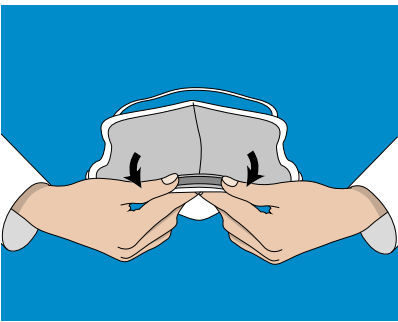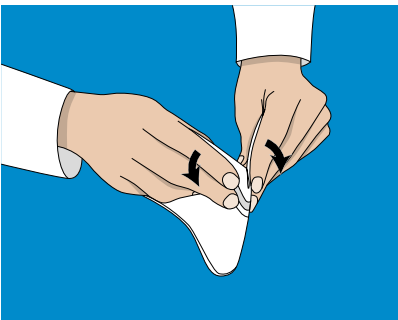


3. Ontvouw het masker door de neusvleugel volledig horizontaal te buigen.

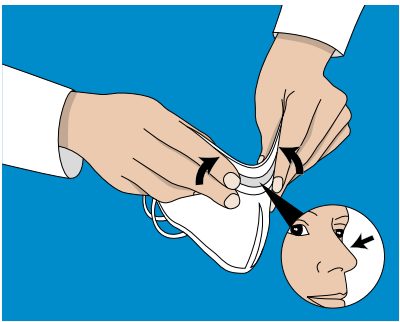

4. Vouw de neusvleugel voor, vergelijkbaar aan de vorm van de bovenkant van uw neus.

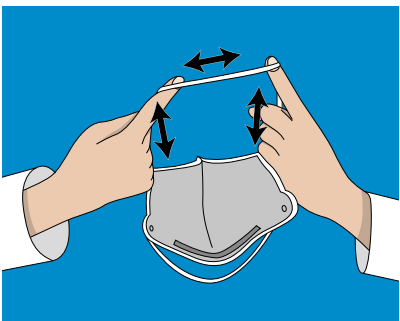

5. Pak het onderste elastiek met beide handen vast en maak ruimte in het elastiek met uw wijsvingers.

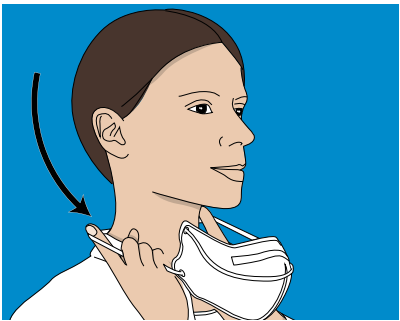

6. Haal het onderste elastiek over uw hoofd, tot het elastiek in de nek rust.



7. Pak het bovenste elastiek en plaats het elastiek op de achterzijde van uw hoofd.



8. Pak het masker met beide handen aan de voorzijde beet en plaats het neusgedeelte op uw neus.


i Zorg dat het onderste gedeelte van het masker zich hierbij onder de kin bevindt.



9. Druk met uw beide wijsvingers en middelvingers op de top van uw neus waar zich het aluminium stripje bevindt.



10. Herhaal dit een aantal keer langs weerszijden van uw neus, tot het aluminium stripje volledig aansluit op uw neus.

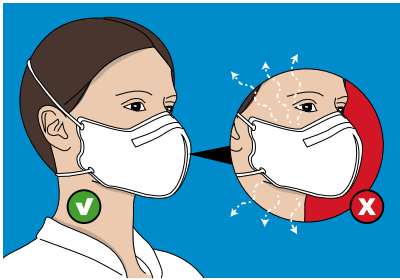

11. Adem uit en controleer of er geen lekkage optreedt rondom het masker.


i Wanneer er lekkage optreedt op of rond de neus, herhaal stappen 9 en 10 totdat het masker goed aansluit.

Afzetten van het masker

Het afzetten van het masker doet u zo:



1. Pak beide elastieken vast, maak wat ruimte met uw vingers en trek de elastieken tegelijkertijd over uw hoofd naar voren.

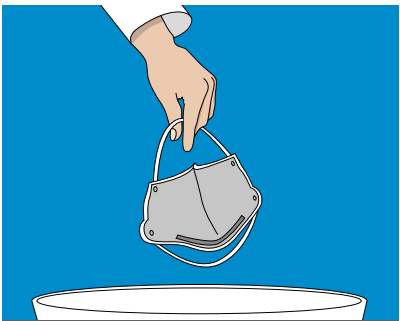

2. Gooi het masker direct weg in een afvalbak voor restafval.

3. Was en ontsmet uw handen.

Opslag en transport

Volg bij het opslaan en transporteren van het gelaatsmasker de volgende instructies:



- ⚠ Bewaar en/of transporteer dit gelaatsmasker altijd binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C.



- ⚠ Bewaar en/of transporteer dit gelaatsmasker altijd onder een luchtvochtigheidsniveau van 80%.



- ⚠ Bewaar en/of transporteer dit gelaatsmasker niet in direct zonlicht.

- ⚠ Bewaar en transporteer dit gelaatsmasker altijd in de originele verpakking.
- ⚠ Bewaar dit gelaatsmasker altijd in een schone, hygiënische, geventileerde en droge locatie.
- ⚠ Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij het gelaatsmasker.
- ⚠ Volg de aanwijzingen op de verpakking voor het correct opslaan van dit gelaatsmasker.